

## **CURATATOR ULTRASUNETE MODEL CODYSON – 4820/4830**

### **1. PANOUL FRONTAL:**

**Butoane prezente: - ON si OFF pentru pornirea si oprirea curatatorului**

- **SET pentru stabilirea timpului de curatare**
- **TC buton pentru activarea sau dezactivarea functiei de incalzire**

-

### **2. Parti componente incluse in cutie :**

- **Baia ultrasunete**
- **Capacul bai ultrasunete**
- **Cordon alimentare priza**
- **Gratar plastic pentru ridicare instrumentarului din solutie**
- **Carte de instructiuni**

-

### **3. Folosirea aparatului :**

- **Despachetati si asamblati toate partile componente ale aparatului**
- **Inainte de introducerea in priza puneti solutie de curatat in cuva intre cele doua semne de minim si maxim de pe peretele cuvei**
- **La pornirea aparatului afisajul va va arata 180 sec care este timpul cel mai des folosit. Dupa pornire acest timp vascadea spre 0. Inainte de pornire aveti optiunea de a modifica acest timp de curatire apasand succesiv tasta SET care va duce afisajul succesiv prin valorile 280 380 480 si apoi din nou 090 si 180 secunde. Alegeti timpul pe care il doriti. Tot in acest moment puteti selecta daca doriti sau nu functia de incalzire a solutiei prin**

apasarea succesiva a butonului TC activand sau dezactivand aceasta functie care atunci cand este activa va fi marcata cu aprinderea unui LED rosu pe afisajul baii de ultrasunete. Dupa ce ati facut toate setarile dorite puteti pune instrumentarul in baai ade ultrasunete pe gratarul de plastic avand grija ca solutia de curatire sa depaseasca partea de sus a instrumentarului. **ATENTIE NU FOLOSITI APARATUL FARA SOLUTIE IN INTERIOR, RISCATI SA RDETI GENERATORUL DE ULTRASUNETE SI INCALZITORUL.**

- Ca solutie de curatire se poate folosi de la simpla apa curata pana la solutii detergenti de vase in concentratie redusa. Recomdandam usoara solutie de spalat vase. **ATENTIE NU INTRODUCETI SOLUTII DEZINFECTANTE SI COROZIVE PENTRU A NU DETERIORA INTERIORUL BAII DE ULTRASUNETE.**
- Dupa o perioada de folosire pe fundul baii de ultrasunete se va alege un strat de pulbere fina care sunt reziduurile indepartate de pe instrumente. Nu este necesarea schimbarea solutiei de curatire dupa fiecare folosire ci doar cand se aduna o cantitate vizibila de mizerie pe fundul baii de ultrasunete.
- Pentru folosirea cu functia de incalzire se recomanda punerea solutiei si a instrumentelor de curatat in interior, pornirea doar a functiei de incalzire, asteptarea a aproximativ 40 minute timp in care temperatura se va ridica pana la aproximativ 65 grade Celsius dupa care puteti activa functia de curatare cu ultrasunete. Dupa atingerea temperaturii de 65 grade celsius aparatul se va decupla automat deci nu exista

riscul arderii elementului de incalzire atata vreme cat aveti solutie in aparatul de curatat.

- In timpul folosirii un LED de culoare verde va va indica functionarea aparatului in regim de generare ultrasunete.

#### 4. Intretinerea aparatului

- se face doar dupa racirea aparatului si scoaterea acestuia din priza
- Se scoate gratarul de plastic scufundat in solutie de curatare
- Se goleste solutia folosita
- Se sterge interiorul cuvei cu o capa inmuiata in apa curata si apoi cu o carp auscata
- Se sterge exteriorul cuvei cu o carpa inmuiata in apa curata si stoarsa bine apoi cu o carpa uscata se sterge bine suprafata exterioara a aparatului.

#### 5. Pastrarea aparatului

- scoatetil din priza pe perioada de nefolosire
- Dupa 3 cicluri de curatare succesiva lasatil 15 minute pauza pentru protejarea elementelor interioare ale aparatului
- Pastrati aparatul in cutia originala intrun loc uscat pe perioada lungi de nefolosire.
- Respectati toate normele de protectie pentru aparatele electrice
- Nu introduceti mana in aparat in timpul functionarii si cata vreme acesta este sub tensiune.
- Folositi aparatul doar cu capacul asezat in pozitie.

**PRECIZARE : NU VA ASTEPTATI LA REZULTATE IZIBIEL DUPA O SINGURA FOLOSIRE A APARATULUI. ACESTA INDEPARTEAZA STRATURILE SUPERFICIALE ALE MURDARIEI MOTIV PENTRU CARE ACEASTA SEDIMENTEAZA SUB FORMA DE PULBERE PE FUNDUL CUVEI. DUPA FOLOSIREA ZILNICA A APARATULUI**

**VETI OBSERVA IN TIMP CA INSTRUMENTARUL VA CAPATA ASPECTUL LUCIOS SI DEPUNERILE NEGRE DINTRE STRIURI VOR DISPAREA. DE ASEMENEA TINETI CONT CA ULTRASUNETELE VOR INDEPARTA MURDARIA CASANTA DEOARECE ULTRASUNETLE INDUC O VIBRATIE IN DEPUNERI CARE SE VOR DESPRINDE DE PE INSTRUMENTAR.**

[www.aparaturastomatologica.ro](http://www.aparaturastomatologica.ro)